

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch – sie enthält wichtige Informationen über die Anwendung dieses Produktes. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker, Ihren Arzt oder direkt an uns.

## BAUSCH + LOMB

# Artelac® Complete MDO®

0,24% Natriumhyaluronat, Carbomer, Glycerin, eine Lipidkomponente, Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke

**Verwendungszweck:** Augenbefeuchtungsmittel

### Was ist Artelac® Complete MDO®?

Artelac® Complete MDO® ist eine milchige Augentropfenlösung, die 0,24 % Hyaluronsäure (als Natriumhyaluronat), Carbomer, Glycerin, eine Lipidkomponente, Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke enthält.

Die innovative Formulierung ist frei von Konservierungsmitteln, pufferfrei und damit sehr gut verträglich.

Das Produkt kann nach dem ersten Öffnen 6 Monate lang verwendet werden.

### Wofür wird Artelac® Complete MDO® angewendet?

Artelac® Complete MDO® ist ein Augenbefeuchtungsmittel, das alle drei Schichten des Tränenfilms ergänzt, um die Benetzung der Augenoberfläche bei trockenen Augen zu verbessern.

### Wann sollte Artelac® Complete MDO® angewendet werden?

Artelac® Complete MDO® enthält das natürliche Befeuchtungsmittel Hyaluronsäure (als Natriumhyaluronat), das in den Strukturen eines gesunden menschlichen Auges und im natürlichen Tränenfilm vorkommt sowie zwei weitere Feuchtigkeitsspendler: Glycerin und Carbomer. Daneben enthält Artelac® Complete MDO® zusätzlich eine Lipidkomponente und ergänzt somit alle drei Schichten des Tränenfilms: die Lipidschicht, die wässrige Schicht und die Muzinschicht.

Artelac® Complete MDO® verbleibt auf der Augenoberfläche und versorgt diese intensiv mit Feuchtigkeit für eine umgehende und lang anhaltende Linderung der Symptome. Es ist das ideale Produkt für alle, die unter den Symptomen des trockenen Auges leiden, wie z.B. müde, gestresste, brennende und/oder tränende Augen sowie Fremdkörpergefühl im Auge.





### Wie häufig und wie lange sollte Artelac® Complete MDO® angewendet werden?

Geben Sie bei Bedarf jeweils einen Tropfen Artelac® Complete MDO® ins Auge. Sie können die Tropfen täglich und so oft anwenden, wie Sie möchten. Die Anwendungsdauer ist nicht begrenzt.

### Wie ist Artelac® Complete MDO® anzuwenden?

#### Achtung! Vor der ersten Anwendung oder wenn die Flasche einige Zeit lang nicht verwendet wurde:

Nehmen Sie die Kappe ab und drehen Sie die Flasche mit der Tropfspitze nach unten. Betätigen Sie maximal 20-mal den Pumpmechanismus, bis ein Tropfen austritt. Die Flasche kann nun verwendet werden.

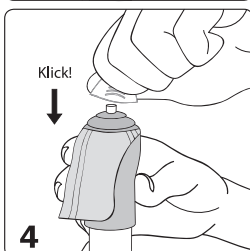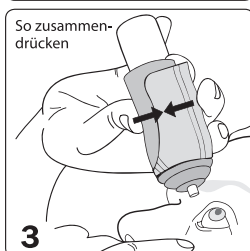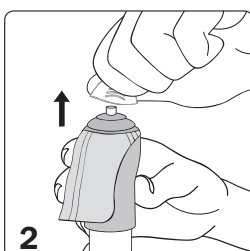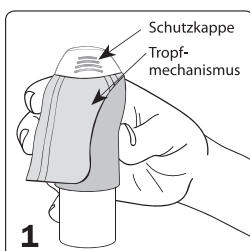

**1.** Waschen Sie sich vor der Anwendung die Hände und halten Sie die Flasche wie gezeigt.

**2.** Nehmen Sie vor jeder Anwendung die Schutzkappe von der Spitze der Flasche ab. Vermeiden Sie, dass die Tropfspitze in Kontakt mit Ihren Fingern oder anderen Oberflächen kommt, um einer möglichen Kontamination der Lösung vorzubeugen.

**3.** Drehen Sie die Flasche um - mit der Tropfspitze nach unten und neigen Sie den Kopf leicht nach hinten. Ziehen Sie mit einem Finger der freien Hand Ihr unteres Augenlid vorsichtig nach unten. Halten Sie die Flasche senkrecht über Ihre Augen und drücken Sie den Pumpmechanismus zusammen, um einen Tropfen in das Auge einzutropfen. Vermeiden Sie es, die Oberfläche Ihres Auges mit der Tropfspitze zu berühren, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Schließen Sie das Auge, bewegen Sie es leicht nach rechts und links und blinzeln Sie, um den Tropfen gut auf der Augenoberfläche zu verteilen.

**4.** Schütteln Sie unmittelbar nach der Anwendung eventuell verbliebene Tropfen ab und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die trockene Tropfspitze auf.

Das angegebene Füllvolumen kann vollständig aus der Flasche entnommen werden. Aufgrund des Flaschendesigns verbleibt eine geringe Menge Lösung in der Flasche.

### Wann darf Artelac® Complete MDO® nicht angewendet werden?

Wenden Sie das Produkt nicht an, wenn Sie allergisch auf einen der Inhaltsstoffe reagieren.

### Wichtige Informationen zur Anwendung von Artelac® Complete MDO®

- Lokale Überempfindlichkeitsreaktionen wurden sehr selten berichtet. Brechen Sie die Anwendung in solchen Fällen ab.
- Dieses Produkt kann nach dem Eintropfen vorübergehendes verschwommenes Sehen hervorrufen, das sich nachteilig auf das Führen eines Fahrzeugs oder das Bedienen von Maschinen auswirken kann.
- Berühren Sie die Augenoberfläche nicht mit der Tropfspitze, um mögliche Verletzungen der Augenoberfläche oder eine Verunreinigung der Lösung zu vermeiden.
- Schütteln Sie nach der Anwendung eventuell verbliebene Tropfen ab.
- Unvorsichtiger Gebrauch des Produkts entgegen der Gebrauchsanweisung kann zum Abrutschen des Produkts aus der Hand und zu Verletzungen am Auge führen.
- Nehmen Sie Kontaktlinsen vor dem Gebrauch heraus.
- Warten Sie ca. 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Präparat anwenden oder Ihre Kontaktlinsen wieder einsetzen.
- Nach dem Verwendbarkeitsdatum nicht mehr verwenden.
- Bei beschädigter Verpackung oder Flasche nicht verwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

**Wie ist Artelac® Complete MDO® aufzubewahren?** Lagern Sie das Produkt bei +1 – +25 °C.

Dank des Flaschendesigns kann Artelac® Complete MDO® nach dem ersten Öffnen 6 Monate verwendet werden.

### Darreichungsform:

Artelac® Complete MDO® ist in Packungsgrößen mit 10 ml Augentropfen erhältlich.

Dieses Produkt ist auch in praktischen, konservierungsmittelfreien Ein-Dosis-Optiotilen (EDO®) erhältlich.

Hersteller  
Fabricant  
Fabbicante

CE 0483

Dr. Gerhard Mann  
chem.-pharm. Fabrik GmbH  
Brunsbütteler Damm 165-173  
13581 Berlin, Germany

Vertrieb / Distributeur / Distributore:  
Bausch & Lomb GmbH  
Brunsbütteler Damm 165-173  
13581 Berlin

E-Mail: kontakt@bausch.com  
www.bausch-lomb.de



Temperaturbegrenzung  
Seuil de température  
Limiti di temperatura



Bei beschädigter Verpackung  
nicht verwenden.  
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.  
Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Gebrauchsanweisung beachten.  
Suivre les instructions d'utilisation!  
Seguire le istruzioni per l'uso!



Verwendbar bis  
Date limite d'utilisation  
Data di scadenza



Das Medizinprodukt 6 Monate nach dem  
ersten Öffnen entsorgen.  
Jetez le dispositif médical 6 mois après  
ouverture.  
Smaltire il dispositivo medico dopo 6 mesi  
dall'apertura



Chargennummer  
Numéro de lot  
Numero di lotto



Steril durch Anwendung  
aseptischer Verfahrenstechniken  
Stérile grâce à l'utilisation de  
technologies aseptiques  
Sterile grazie all'uso di  
tecnologie aseptiche