




sensipo.

Das praktische Bidet für den Anal- und Intimbereich.
Rein mit Wasser sanft abduschen, natürlich reinigen
und frisch fühlen.

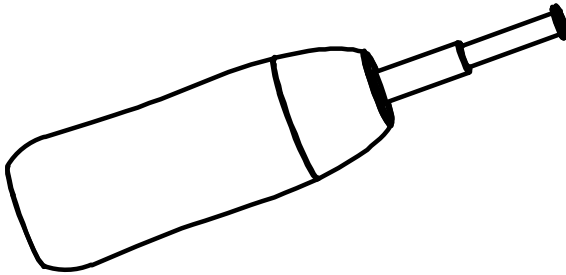

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

danke, dass Sie sich für **sensipo** entschieden haben.
sensipo ist ein ideales Produkt zur einfachen hygienischen
Reinigung und Pflege des sensiblen Anal- sowie Intimbereichs
und für ein frisches Gefühl. Reduzieren Sie empfindliche
Reizungen am Po durch eine sanfte Dusche mit purem
Wasser. Geeignet zur natürlichen und sanften Reinigung,
nach dem Stuhlgang, zur allgemeinen Intimhygiene, Frauen-
hygiene sowie nach der Schwangerschaft. Praktisch zu Hause
und unterwegs.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.
Sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses
Produkts. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an entsprechendes Fachpersonal wie z.B. Ärzte, Hebammen,
Apotheker oder direkt an uns.

Wozu wird sensipo angewendet?

sensipo ist ein Bidet im handlichen Miniformat zur einfachen hygienischen Reinigung und Pflege des sensiblen Anal- sowie Intimbereichs und für ein frisches Gefühl.


Reduzieren Sie empfindliche Reizungen am Po durch eine sanfte Dusche mit purem Wasser. Geeignet zur natürlichen und sanften Reinigung, nach dem Stuhlgang, zur allgemeinen Intimhygiene, Frauenhygiene sowie nach der Schwangerschaft. Auch einsetzbar während der Menstruation. Die natürliche und sanfte Dusche mit Wasser kann auch bei Kindern sowie pflegebedürftigen Menschen empfohlen werden.

Nutzen Sie **senisipo** zur täglichen Intimerfrischung für mehr Wohlgefühl, ob zu Hause oder einfach unterwegs, als Alternative zu Feuchttüchern und regulieren Sie damit Ihren ganz persönlichen Toilettenpapierverbrauch.


Für den täglichen Einsatz geeignet. Kombinieren Sie **sensipo** mit anderen geeigneten Produkten von nexsana.

Wie wird sensipo angewendet?


Stellen Sie vor jeder Anwendung sicher, dass **senisipo** vollständig entleert und sauber ist. Bitte beachten Sie folgende Schritte zur Anwendung sowie die weiteren Anwendungshinweise.

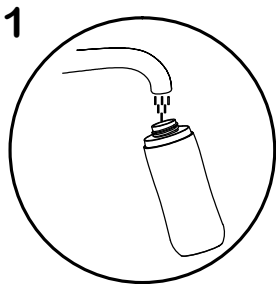


sensipo mit sauberem, kaltem bis lauwarmem Wasser befüllen.

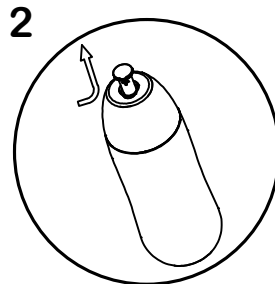


Sprühkopf aus dem Deckel des Bidets an der Einkerbung herausziehen.

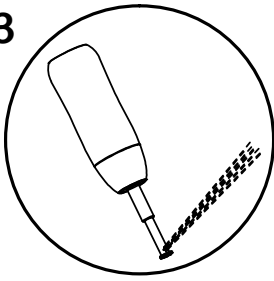3


In Sitzposition auf der Toilette, in der Dusche oder Badewanne anwenden. Zum Abduschen zusammendrücken.

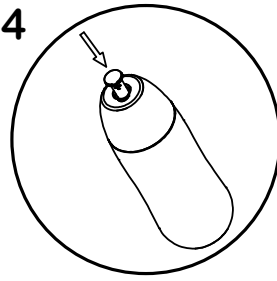4

Nach Anwendung den Sprühhals vorsichtig wieder hineindrücken. Gereinigte Stelle sanft abtupfen.

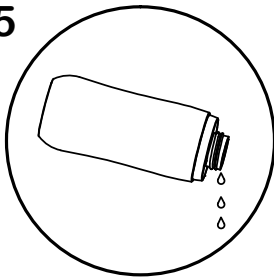5

Entleeren Sie die restliche Flüssigkeit vollständig.

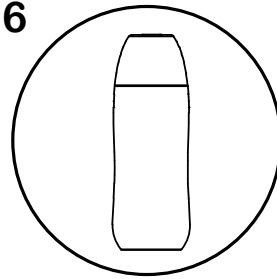6

Reinigen Sie **sensipo** nach Möglichkeit nach und vor jeder Anwendung.

Wichtige Anwendungshinweise

Reinigen Sie **sensipo** regelmäßig und vor jeder Anwendung gründlich mit einer Seifenlösung oder milden Waschlotion. Leeren Sie den restlichen Inhalt nach der Anwendung vollständig aus und lassen Sie restliche Flüssigkeit bis zur Trocknung entweichen. Nicht auskochen. Nicht in der Mikrowelle erhitzen. Verwenden Sie **sensipo** nur für den beschriebenen Anwendungszweck.

Besondere Hinweise

Eine sanfte, natürliche Pflege des empfindlichen Anal- und Intimbereichs kann Erkrankungen vorbeugen. Suchen Sie z.B. bei Schmerzen, Juckreiz oder anderen auffälligen Blutungen unbedingt Ihren Arzt auf. Eine rechtzeitige Erkennung von Erkrankungen erhöht die Heilungschance.

Aufbewahrungshinweise:

Produkt sorgfältig aufbewahren.
Vor Kindern sichern.

Inhalt:

Bidet mit Sprühfunktion und Gebrauchsanweisung.


sensipo.

nexsana GmbH
Windheckenweg 79
53902 Bad Münstereifel

Telefon: +49 2253 93 999 41

Fax: +49 2253 93 999 93

E-Mail: service@nexsana.de

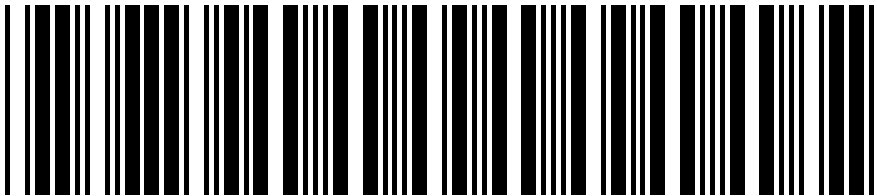

PZN -16696966

AN-40001-000

www.haemorrPEN.de
www.nexsana.de

Stand der Information: August 2020

nexsana