

# MediGel®

## WUNDREINIGUNGSSPRAY

Zur schmerzfreien Reinigung von akuten und chronischen Wunden



### Zweckbestimmung

MediGel® Wundreinigungsspray ist eine alkoholfreie Lösung zur Reinigung, Dekontamination, Befeuchtung und Heilung von akuten und chronischen Wunden. MediGel® Wundreinigungsspray kann auch beim Verbandwechsel zum Lösen anhaftender Verbandstoffe oder Verkrustungen verwendet werden.

### Eigenschaften

MediGel® Wundreinigungsspray ist eine farblose, geruchlose Lösung zur schmerzfreien physikalischen Wundreinigung von akuten und chronischen Wunden. Akute Wunden sind oft verunreinigt durch Schmutz, Fremdkörper oder Mikroorganismen. Hier ist eine gründliche und schonende Wundreinigung wichtig für eine schnelle Wundheilung. Chronische Hautwunden sind häufig mit Wundsekret, abgestorbenem Gewebe und Biofilmen belegt. Diese Beläge verzögern die Wundheilung und müssen deshalb entfernt werden. Bei beiden Wundtypen ist eine schonende Wundreinigung und Wundbefeuchtung mit MediGel® Wundreinigungsspray angezeigt. MediGel® Wundreinigungsspray besitzt eine hervorragende Reinigungsleistung auf der Wundoberfläche sowie den angrenzenden Hautarealen und fördert die Wundheilung.

Der niedrige pH-Wert, der durch die Anwesenheit von Zink- und Eisenionen unterstützt wird, aktiviert den natürlichen Heilungsprozess und leitet die Gewebeneubildung ein.

MediGel® Wundreinigungsspray dient der effektiven Dekontamination von belegten und kontaminierten Wunden (z. B. MRSA). Es zerstört den Biofilm und die chronisch-stagnative Heilungsphase wird überwunden.

MediGel® Wundreinigungsspray bewirkt durch seine physikalischen Eigenschaften:

- Schutz vor Infektionen
- Förderung der Wundheilung
- Optimierung des Wundmilieus
- Schmerzlinderung und Kühlung

### Hinweise zur Anwendung

MediGel® Wundreinigungsspray kann unmittelbar nach der Verletzung auf die Wunde gesprüht werden. Anschließend sollte MediGel® Wundreinigungsspray mittels handelsüblicher steriler Mullkompressen wischend entfernt werden (mechanische Reinigung). Ein Nachspülen ist nicht erforderlich.

Zur Befeuchtung der Wunde handelsübliche Verbände und Wundauflagen (z. B. Kompressen, Gaze) ausreichend mit MediGel® Wundreinigungsspray befeuchten und auf die Wunde ca. 10-15 Minuten auflegen. Nach der Einweichphase können Verkrustungen und anhaftende Verbände gelöst werden.

MediGel® Wundreinigungsspray ist zum wiederholten und langfristigen Gebrauch geeignet. Siehe unter Zweckbestimmung.

MediGel® Wundreinigungsspray ist nicht zytotoxisch, nicht irritierend und nicht sensibilisierend. MediGel® Wundreinigungsspray enthält keine hautreizenden Substanzen.

### Vorsichtsmaßnahmen

- MediGel® Wundreinigungsspray ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt und darf nicht eingenommen werden. Nicht zur Infusion oder Injektion anwenden.
- Es ist auf eine hygienische Entnahme zu achten. Ist die Flasche mit der Wunde in Kontakt gekommen oder anderweitig verunreinigt, ist sie umgehend zu entsorgen.
- Bitte Flasche nach Gebrauch verschließen und Verunreinigungen vermeiden.
- Nur einwandfreie und unbeschädigte Behälter verwenden.
- Schwangerschaft und Stillzeit: Es finden sich keine Anhaltspunkte auf mutagene oder embryotoxische Wirkungen der Inhaltsstoffe jedoch sollte die Anwendung bei Schwangeren, Stillenden, Säuglingen und Kleinkindern nur bei zwingender Indikation nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

## Wechselwirkungen

Bei bekannter Allergie oder Verdacht allergischer Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht eingesetzt werden. Nicht verwenden in Kombination mit anionischen Tensiden.

Kontakt mit Knorpelgewebe sollte vermieden werden. Bei sehr großen, stark nässenden oder infizierten Wunden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da unter Umständen eine spezielle Behandlung erforderlich ist. Ab Verbrennungen Grades 2b sollte ein Arzt hinzugezogen werden.

## Nebenwirkungen

Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen sie diese bitte Ihrem Apotheker oder dem Hersteller mit.

## Hinweis zur Aufbewahrung

- Temperaturbegrenzung beachten.
- Das Produkt vor direktem Sonnenlicht schützen.
- Trocken aufbewahren.
- Gebrauchsanweisung beachten.
- Vor Kindern sicher aufbewahren.
- Haltbarkeit: 3 Jahre nach Herstellung. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Aufbrauchsfrist: 3 Monate nach Anbruch

## Bestandteile

Aqua purificata, Cocamidopropyl Betaine, Trace Elements (Zinc, Iron), Polyaminopropyl Biguanide.

## Packungsgrößen

50 ml

Stand der Information: März 2019

## Erläuterung der Symbole auf dem Umkarton



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Medizinprodukt



Beschädigte Flasche nicht verwenden



Temperaturbegrenzung



Hersteller



Nach Anbruch 3 Monate haltbar



Vor Sonnenlicht schützen



Vor Feuchtigkeit schützen

REV 032019

## Hersteller



MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG  
Kuhlowneg 37, 58638 Iserlohn

Telefon: +49 (0) 2371 937-0  
Telefax: +49 (0) 2371 937-329  
E-Mail: [info@medice.de](mailto:info@medice.de)  
[www.medice.de](http://www.medice.de)